




DIGITAL
NYCKELHANTERING

Nedan beskrivs handhavandet för nödöppning av Phoniros digitala medicinskåp, MEDIC.

NÖDÖPPNING

Om medicinskåpet behöver nödöppnas används en polygrip lik bilden. Ta tag i handtaget med polygripen och vrid vredet motsols. Vredet ska vridas åt vänster tills handtaget är helt urgångat. Nu kan skåpet öppnas.

Notera. Vredet förstörs när man tillämpar nödöppning. Efter nödöppning krävs nytt vredkit som beställs via Phoniros orderavdelning.

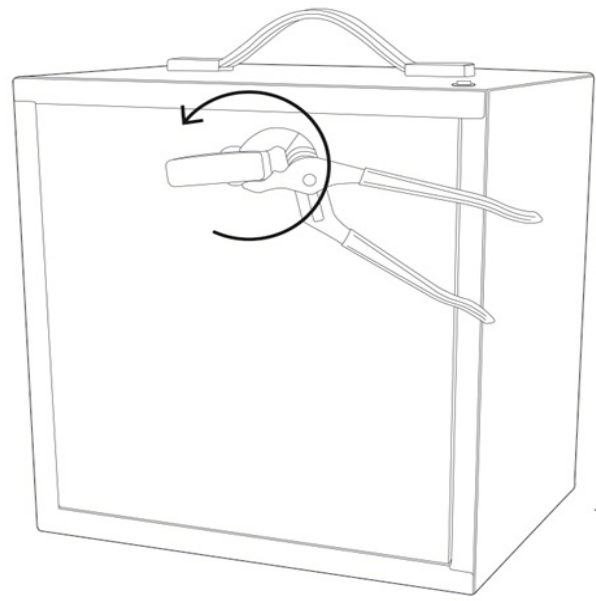

SUPPORT

Kontakta Phoniro Support på telefon 010-456 72 20 vid problem med systemet. Vi finns här för att hjälpa dig.